



Gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjne o działaniu sporobójczym (w tym Clostridium difficile) na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych i wszelkiego rodzaju powierzchni

mikrocid® PAA wipes chusteczki

Zalety

- skuteczność wobec B (Tbc), F, V, S, (w tym C. difficile i Bacillus subtilis),
- gotowy do użycia,
- nie wymaga aktywacji,
- możliwość stosowania w dezynfekcji sond TEE (echokardiografii przezprzełykowej)

Obszary zastosowania

Produkt mikrocid®PAA wipes dzięki szerokiemu spektrum działania i krótkiemu czasowi oddziaływania jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie istnieje wysokie ryzyko namnażania drobnoustrojów chorobotwórczych, np.: izolatki, sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, oddziały neonatologiczne, "brudne" sektory w obrębie centralnej sterylizatorni i pracownie endoskopowe. Preparat do dezynfekcji w obszarach wysokiego ryzyka w tym ognisk C. difficile. Chusteczki przeznaczone są do dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym inkubatorów) oraz wszelkiego rodzaju powierzchni. Szczególnie zalecane są do powierzchni znajdujących się w pobliżu pacjenta oraz powierzchni mających częsty kontakt z rękami i skórą. Ze względu na szerokie spektrum działania oraz doskonałą tolerancję materiałową chusteczki mikrocid®PAA wipes mogą być stosowane do dezynfekcji powierzchni bezkanałowych wyrobów medycznych takich jak :

- sondy do przezprzełykowej echokardiografii (TEE)
- wzierniki nosowo-gardłowe (otorynolaryngologia),
- sondy ultradźwiękowe

Chusteczki dostępne są w rozmiarze 20cm x 30cm.
Trwałość od chwili otwarcia opakowania: 28 dni.

Wskazówki dotyczące stosowania

Powierzchnie należy dokładnie przetrzeć chusteczką, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Przed użyciem

mikrocid®PAA wipes należy upewnić się, że z powierzchni usunięte zostały wszelkie widoczne zabrudzenia.

Skuteczność mikrobiologiczna

Skuteczność	Stężenie	Czas działania
bakteriobójczo EN13727	gotowy do użycia	30 s
bójcze wobec prątków gruźlicy EN14348	gotowy do użycia	15 min.
grzybobójczo EN13624	gotowy do użycia	2 min.
adeno EN14476	gotowy do użycia	1 min.
polio EN14476	gotowy do użycia	15 min.
sporobójczo EN14347	gotowy do użycia	5 min.

CE 0297



mikrozid[®] PAA wipes

chusteczki

Dane produktu

100 g preparatu dezynfekcyjnego, którym nasączone są chusteczki zawiera: 0,07% kwas nadoctowy oraz nadtlenek wodoru i kwas octowy.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 1,02 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	bezbarwny
pH	ok. 2,2 / 20 °C / koncentrat
Temperatura zapłonu	nie dotyczy

Badania i informacje

Dopuszczenia producentów:

- sondy TEE firmy Phillips,
- głowice ultradźwiękowe firmy Phillips,
- endoskopy firmy Karl Storz

Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.

Zwroty ryzyka i bezpieczeństwa (R,S)

Xi	Produkt drażniący
R36/38	Działa drażniąco na oczy i skórę.
S 2	Chronić przed dziećmi.
S25	Unikać zanieczyszczenia oczu.
S28	Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Wskazówki szczególne

Środki dezynfekcyjne należy stosować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przed każdorazowym użyciem należy zapoznać się z oznakowaniem i informacją o produkcie. Chronić przed działaniem wysokich temperatur i promieni słonecznych. Produkt mikrozid[®]PAA wipes nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wykonanych z mosiądzu, miedzi, aluminium, a także na powierzchniach chromowanych. Należy przestrzegać uwag producenta odnośnie powierzchni poddawanych działaniu preparatu, a w razie potrzeby należy potwierdzić tolerancję materiałową przed zastosowaniem produktu. Nie używać po upływie terminu ważności.

Termin ważności: 1 rok

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
MIKROZID PAA WIPES chust. 50ST DS	10/Karton	128101

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Produkty firmy Schülke & Mayr GmbH wytwarzane są według nowoczesnych i bezpiecznych technologii z zachowaniem dbałości o ochronę środowiska, zasad ekonomicznych i wysokich standardów jakości.



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.



Przedsiębiorstwo należące do grupy Air Liquide



Schulke Polska
Schulke Polska Sp. z o. o.
Rydygiera 8
01-793 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 568-22-02
Telefax +48 0 22 568-22-04
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.pl

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com